

ARTIKELNUMMER: 53003

CE

## **Huikeshoven urinezakhoes 2000 ml (wit)**

### Product omschrijving

De urinezakhoes is gemaakt van zacht textiel ( 35% katoen en 65% polyester) en bevat geen latex. De urinezakhoes zorgt voor de bescherming en afscherming van een 2000 ml urinezak. De hoos is voor bijna alle urinezakstandaards en urinezakbedhangers geschikt. De urinezakhoes is wasbaar tot 90°C. Advies temperatuur is 60°C.

### Gebruiksaanwijzing

Maak de drukknopen van de urinezakhoes open.  
Breng de urinezakhoes over de urinezak en de standaard/ hanger heen. Let daarbij op dat de slang door de bovenkant van de hoos wordt gehaald. Sluit vervolgens de drukknopen van de hoos en breng eventueel de hoos netjes op zijn plaats.

### Vragen

Wanneer er nog vragen zijn neemt dan contact op met de distributeur  
Huikeshoven Medical bv: Tel. 0344-651444, Fax 0344-651904, [info@huikeshovenmedical.nl](mailto:info@huikeshovenmedical.nl)

